

Totes les mostres s'enviaran al laboratori **perfectament envasades i identificades**.

Es recomana prendre la mostra dels animals que presentin simptomatologia i si es possible que no estiguin medicats, el més ràpid possible des de la mort o sacrifici de l'animal i amb la màxima higiene possible.

Adjuntar sempre **la fulla de sol·licitud** d'anàlisi, disponible també a la web, amb la màxima informació possible (client, explotació, contacte, anàlisi sol·licitat).

Les mostres han d'enviar-se en les millor condicions de manteniment depenent de cada tipus d'estudi (**refrigeració, congelació...**) i realitzar l'enviament el més aviat possible (**24-48h**).

Per qualsevol tipus de mostra que no estigui descrita a continuació, recomanem que es fiquin en contacte amb el laboratori.

Hisops/ Torundes

- Recomanacions per a la presa de la mostra: Introduir el hisop/torunda directament en el recte, raspar suaument contra les parets.
- Ús de hisops/ torundes amb medi de transport específic segons tècnica d'anàlisi.
Ex. Tipus AMIES o STUART per anàlisi bacteriològics i medis líquids o hisops/torundes sense medi per Biologia Molecular.
- Evitar la congelació de les mostres, se conservaran i enviaran refrigerades.
- Cal utilitzar aquesta tècnica únicament en cas de dificultat en el enviament dels òrgans.

Cadàvers / Visceres

- Recomanacions per a la presa de mostres: evitar l'enviament de mostres autolítiques. Quan l'enviament no pugui realitzar-se de manera immediata o per animals grans, seria recomanable realitzar la necròpsia en camp i la selecció de les vísceres, anotant les lesions observades. Les mostres sempre han de ser d'animals No medicats.
- Les mostres s'enviaran en envasos estèrils i perfectament precintats.
- És imprescindible evitar barrejar vísceres, cada òrgan o mostra ha de tenir el seu propi envàs.
- Enviar mostres representatives, senceres, no porcions i en perfecte estat de conservació.
 - En el cas **d'estudis nerviosos** es recomana enviar cap sencer, evitar cops al crani que poden contaminar la mostra.
- Quantitat mínima recomanada: en funció de les possibilitats s'enviaran les vísceres senceres o prendre mostres dels òrgans lesionats.
- És necessari evitar la congelació de les mostres se conservaran i enviaran refrigerades 6-8°C.